



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/09/30

檢驗項目(中文/英文)	活化部分凝血活酶時間/APTT	
醫令代碼	080360000001	
檢體類別	血液	
採檢容器及檢體量	 含 3.2% sodium citrate 之真空採血管。	檢體量： 全血量與 sodium citrate 成 9:1 之比例(至透明白線)。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	- 不良檢體:檢體少於或多於標記之透明白線、溶血達 2+ 以上、檢體凝固、檢體存放超過 4 小時未檢測、病人資料不符，皆以退件重新採檢處理。 - 患者 Hct>55%。	
檢驗操作方法/儀器	凝固法/CS-1600	
可送檢時間	24 小時	
報告完成時間	急件：1 小時。	
檢驗效能/干擾	- 檢驗效能 AMR:0~1800sec. - 干擾 溶血、凝血及脂血。	
檢體運送及保存方式	- 檢體運送:室溫。 - 當日離心後檢體室溫可存放 4 小時。 - 血漿在-20℃可保存兩週。 - 血漿在-70℃可保存6個月。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血液組/4303	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼:08036B 給付點數:180點 自費價格:234元	
生物參考區間	1. 參考範圍：23.9-34.9 sec。	

(包含臨危值通報)	肝素治療範圍：一般為Ratio 2.0－2.5，實際範圍依照醫師治療方式而定。 2. 臨危值 ≥ 90 sec
臨床意義與用途： 可用於篩選先天性內在路徑(intrinsic pathway)凝血因子缺乏、肝素治療及肝功能障礙病人監控與肝功能恢復的狀態，也可篩選病患血中是否有抑制劑存在。 APTT 秒數延長可見於先天性凝固因子缺乏、低纖維蛋白症(<100mg/dl)、維他命 K 缺乏、肝病、血中有抑制劑等疾病。	
備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 1. 自行操作 2. 可接受委託檢驗	