



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/09/30

檢驗項目(中文/英文)	D-D 雙合試驗/FDP-D dimer	
醫令代碼	080790000001	
檢體類別	血液	
採檢容器及檢體量		檢體量： 全血量與 sodium citrate 成 9:1 之比例(至透明白線)。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1. 不良檢體:檢體少於或多於標記之透明白線、溶血達 2+以上、檢體凝固、檢體存放超過 4 小時未檢測、病人資料不符，皆以退件重新採檢處理。 2. 患者 Hct>55%。	
檢驗操作方法/儀器	免疫三明治法與ELFA (Enzyme Linked Fluorescence Assay) / VIDAS 3	
可送檢時間	24 小時	
報告完成時間	急件:70分鐘內完成 一般件:2 小時內完成	
檢驗效能/干擾	1. 檢驗效能 AMR: 45-10000 ng/mL (FEU) 2. 干擾 凝血、溶血	
檢體運送及保存方式	1. 檢體運送:室溫。 2. 當日離心後檢體室溫可存放 4 小時。 3. 血漿在-20℃可保存兩週。 4. 血漿在-70℃可保存6個月。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血液組/4303	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼:08079B 給付點數:367點 自費價格:477元	

生物參考區間 (包含臨危值通報)	1. 參考範圍： < 500 ng/mL rule out DVP、PE 2. 臨危值： 無
臨床意義與用途： D-Dimer 除了用來幫助 Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)的診斷外，在臨床應用上 D-Dimer cut-off value 是用來排除 DVT (Deep vein thrombosis 深部靜脈栓塞)和 PE(Pulmonary embolism 肺栓塞)。 D-Dimer並非僅存在於DIC、VTE、PE狀態下。臨床上，可輔助於凝血和纖溶啟動時的其他各種條件(如手術、外傷、感染、炎症、妊娠(或習慣性流產)、癌症)下也可觀察到其升高。	
備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 1. 自行操作 2. 可接受委託檢驗	