



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/09/30

檢驗項目(中文/英文)	纖維蛋白原/Fibrinogen	
醫令代碼	080230000001	
檢體類別	血液	
採檢容器及檢體量	 含 3.2% sodium citrate 之真空採血管。	檢體量： 全血量與 sodium citrate 成 9:1 之比例(至透明白線)。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	- 不良檢體:檢體少於或多於標記之透明白線、溶血達 2+以上、檢體凝固、檢體存放超過 4 小時未檢測、病人資料不符，皆以退件重新採檢處理。 - 患者 Hct>55%。	
檢驗操作方法/儀器	凝固法/CS-1600。	
可送檢時間	24 小時。	
報告完成時間	急件：1小時。	
檢驗效能/干擾	- 檢驗效能 AMR:30~700 mg /dL. - 干擾 溶血、凝血及脂血。	
檢體運送及保存方式	- 檢體運送:室溫。 - 當日離心後檢體室溫可存放 4 小時。 - 血漿在-20℃可保存兩週。 - 血漿在-70℃可保存6個月。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血液組/4303	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼:08023B 給付點數:120點 自費價格:156元	
生物參考區間	1. 參考範圍	

(包含臨危值通報)	180~350 mg/dL. 2. 臨危值 無
臨床意義與用途： 纖維蛋白原缺乏的情況：先天性無纖維蛋白原血症、先天性低纖維蛋白原血症、肝硬化、大量出血、妊娠、流產、DIC、中毒、纖維蛋白溶解症、癌轉移、AML(M3、M4)、嚴重燒傷、過敏性休克、營養缺乏、壞血病、抗凝血劑(UK)治療。 纖維蛋白原增加的情況：急慢性炎症、服用雌性素、妊娠、惡性腫瘤、手術後、心肌梗塞、腎綜合病徵、糖尿病。	
備註: (包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 1. 自行操作 2. 可接受委託檢驗	