



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/09/30

檢驗項目(中文/英文)	白血球鹼性磷酸酶染色/LAP stain	
醫令代碼	080440000002	
檢體類別	血液	
採檢容器及檢體量	 採檢容器：綠頭含 heparin 抗凝劑之真空採血管	檢體量：2 mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	1. 採檢後請180度輕微搖晃8~10次，以利抗凝劑混合均勻 2. 檢體須在2小時內送檢	
檢驗操作方法/儀器	人工染色鏡檢/光學顯微鏡	
可送檢時間	W1-W5 正常上班時間至下午 3 點	
報告完成時間	3天	
檢驗效能/干擾	干擾 1. 風乾不完全會使細胞脫落影響判讀。 2. 因為酵素會逐漸降低活性，需使用新鮮血液標本，並加 Heparin 抗凝劑(勿用 EDTA，此劑會抑制磷酸酶)。	
檢體運送及保存方式	1. 檢體運送:室溫。 2. 尚未抹片之檢體常溫保存並盡快操作。 3. 抹片製作完成需立即進行染色或保存於暗處。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血液組/4303	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：08044B 給付點數：225點 自費價格：293元	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	1. 生物參考區間 男性：170-335 scroe 女性：189-369 scroe 2. 臨危值	

無

臨床意義與用途：

LAP Score 點數增減及其相關之疾病

增加	減少	極度減少
感染症引起之類白血病反應	原因不明血小板減少症	慢性骨髓性白血病(CML)
妊娠	AML	病毒性肝炎
真性多血症	惡性貧血	傳染性單核球增多症
續發性多血症	骨髓不良症候群	陣發性夜間血紅素尿症 (PNH)
蒙古症	一些膠原血管病	
Hodgkin 氏病		
再生不良性貧血		
骨髓纖維化		
淋巴性白血病		

備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)

1. 自行操作
2. 無法接受委託檢驗