



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/09/30

檢驗項目(中文/英文)	糖水試驗/Sugar water test
醫令代碼	080410000001
檢體類別	血液
採檢容器及檢體量	 檢體血液，裝於3.2% Sodium citrate 抗凝劑之試管(藍頭)。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1. 檢體需為新鮮血液 2. 採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻
檢驗操作方法/儀器	血球溶血法
可送檢時間	週一至週五中午 12:00 前
報告完成時間	一般件: 24 小時內完成
檢驗效能/干擾	1. 檢驗效能 在低電解質的蔗糖水中，IgG 非特異性地和 PNH 紅血球結合，補體經傳統路徑活化而引起溶血。 2. 干擾 凝血及溶血
檢體運送及保存方式	1. 檢體運送: 室溫。 2. 室溫可保存 8 小時，新鮮檢體尤佳。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血液組/4303
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：08041B 給付點數：50點 自費價格：65元
生物參考區間 (包含臨危值通報)	1. 生物參考區間： 陰性 2. 臨危值： 無

臨床意義與用途：

1. Sugar Water 陽性的病例有：

血紅素尿症、再生不良性貧血及尚未確定之溶血性病人。

2. 若 Sugar water test 為陽性，Ham Test 也為陽性，則可確定診斷為夜間血色素尿症（PNH）。

備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)

1. 自行操作

2. 無法接受委託檢驗