



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：114/12/22

檢驗項目(中文/英文)	交叉試驗 / Cross matching
醫令代碼	110020000001(不用開立)
檢體類別	Blood
採檢容器及檢體量	 EDTA tube 2- 3 mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1.需有抽血者與核對者雙重核對 2.注意檢體是否溶血，若有溶血則重新採檢
檢驗操作方法/儀器	Manual polybrene 試管法、傳統三相法(AHG Phase)
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：1 天 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	冷凝集素、特異性冷型抗體、自體抗體及不規則抗體皆可能導致交叉配合試驗陽性
檢體運送及保存方式	1. 檢體運送:室溫運送 2. 保存方式:操作完後於 1~6°C 冷藏保存
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血庫組/分機 4300
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保碼：11002C 健保(點)：200 自費(元)：260
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Type and cross matching compatible
臨床意義與用途： 輸血前之交叉試驗，為輸血前檢查之一，測定供血者的血球與病人的血漿有無發生抗原抗體反應，以防止輸血反應的發生，確保病人輸血安全。	
備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 自行操作，不接受委託及委外操作	