



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/10/23

檢驗項目(中文/英文)	孕婦乙型鏈球菌培養／Group B Streptococcus culture	
醫令代碼	661E25002-48（懷孕達 35～37 週之孕婦）／ 661E25002-49（早產孕婦補助服務）	
檢體類別	生殖道及直腸末端檢體。	
採檢容器及檢體量		COPAN運送培養基(Stuart's或Amies)： 採集生殖道及直腸末端檢體
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	一 檢體採集： 1. 使用COPAN運送培養基之棉棒，將採檢拭子置放入孕婦陰道口內約2公分處（Vaginal introitus），採集黏膜分泌物（勿使用窺陰器），使用同一採檢拭子，置放入孕婦肛門口內約2.5公分處（需穿過肛門），以旋轉之方式採集檢體。 2. 至少採集一支COPAN運送培養基送檢。 3. 室溫運送至檢驗科微生物室。 二 保存： 若無法當日送達，於4℃下可保存24小時。	
檢驗操作方法/儀器	1. 微生物培養。 2. VITEK 2全自動微生物分析儀。 3. MALDI-TOF質譜儀。	
可送檢時間	週一～週日，24Hrs。	
報告完成時間	No growth of Group B Streptococci：四個工作天。 Growth：配合陽性生長，微生物鑑定後發出。	
檢驗效能/干擾	檢體採集不良會造成培養結果偽陰性。	
檢體運送及保存方式	1. 當日室溫運送檢驗科， 2. 若檢體無法立即接種，需置於冰箱（2～6℃）保存，24 小時內接種完成。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	微生物組/4306	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼: 66／68（早產孕婦補助服務） 給付點數:500 自費價格:650	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	1. 陰性：四天發No growth of Group B streptococci.報告。 2. 陽性：進行藥敏操作後核發菌株名稱與藥敏結果報告。	
臨床意義與用途： 新生兒乙型鏈球菌感染會造成敗血症、腦膜炎、新生兒肺炎，嚴重者甚至可能致死。乙型鏈球菌常見於女性的泌尿及生殖系統，多數帶菌的婦女並不會發病，少數人有泌尿道感染症狀，新生兒抵抗力弱，所以可能在產道中受到母親垂直的感染。建議懷孕 35 至 37 週之孕婦做		

此篩檢。

備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)
自行操作

E6A0021968-G2