


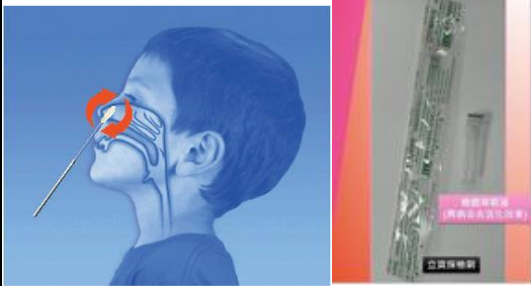

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：114/10/30

檢驗項目(中文/英文)	新冠狀病毒抗原檢測 Covid-19 Antigen Rapid Test
醫令代碼	LCOVID194001
檢體類別	Nasal aspirate, Nasopharyngeal
採檢容器及檢體量	 採檢容器：專用採檢拭子
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	<ol style="list-style-type: none">1. 採檢容器必須是無菌的，並配合無菌操作技術採檢。 並儘快送到檢驗醫學科。2. 檢體需標示：病人姓名、性別、年齡、病歷號、床號、採檢時間或 採檢人員等，可辨識檢驗來源。3. 檢驗申請單上應詳細註明：病人姓名、性別、年齡、病歷號、檢驗 類別、檢體部位或來源、檢體收集時間及日期、醫師之臆測診斷。
檢驗操作方法/儀器	快速免疫層析法/VTRUST COVID-19 Antigen Rapid Test
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	1 小時
檢驗效能/干擾	<ol style="list-style-type: none">1. 不適合或遭污染之檢體。2. 試劑遭污染或過期。
檢體運送及保存方式	<ol style="list-style-type: none">1. 裝在雙層夾鏈袋室溫送檢驗科。2. 當通報新冠併發重症，檢體由傳送人員用專用傳送箱送到微生物組。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	微生物組:4306/4356
健保代碼/給付點數/ 自費價格	14084C 給付點數:150 自費:依本院價格
生物參考區間 (包含臨危值通報)	<ol style="list-style-type: none">1. Negative2. 當檢體結果為Positive，危險值簡訊通知感控管制中心值班人員跟開單 醫師，以利相關法定傳染病通報。
臨床意義與用途： 利用免疫層析法定性檢測出出現 covid-19 疑似症狀之人類鼻咽拭子檢體中新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2)的核蛋白(nucleocapsid protein antigen)，在感染急性期，可以疑似病患的上呼	

吸道中採檢到 SARS-CoV-2 抗原，目的在輔助嚴重特殊傳染性肺炎的早期診斷。
備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 自行操作