


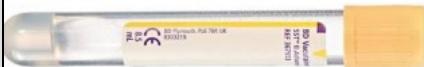

## 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

### 服務資訊

更新日期：114/09/15

檢驗項目(中文/英文)	快速血漿反應素試驗/STS-RPR	
醫令代碼	120010000001	
檢體類別	血清	
採檢容器及檢體量		橘黃管單項量 3 ml
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	採檢後 8 小時內 3500 rpm 離心 10 分鐘。	
檢驗操作方法/儀器	凝集反應/人工操作	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	3 工作天	
檢驗效能/干擾	脂血症並不會干擾卡片試驗，但脂血的程度嚴重到會遮蓋住抗原顆粒，則該檢體應被視為不適合做此項檢驗。 不要檢驗嚴重溶血、污染，或是很混濁的檢體。	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件：室溫運送 檢體保存方式：血清保存期限為 2–8 °C 保存 5 天。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12001C/70 點(自費價格：91 元)	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	正常參考值：Non-Reactive 當檢驗報告的數據為 Reactive,>1:1 時，需簡訊通報醫師，並將結果紀錄於法定傳染病通報紀錄單。	
臨床意義與用途：	<p>梅毒是屬於一種由接觸傳染的性病，致病菌為梅毒螺旋體。病患感染梅毒後 4 到 6 個星期後出現抗體，即反應素(Reagin)為一種抗類脂質抗體 IgG 及 IgM，反應素是由螺旋體和將宿主細胞破壞後所釋出之類脂質物質刺激宿主免疫系統所產生的抗體，因此產生偽陽性的機率很高，雖其不具特異性，但在診斷梅毒之血清檢查上極具價值，主要用於初步篩檢。</p>	
備註:可自行操作/可接受委託檢驗。		