


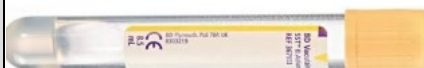

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：114/09/15

檢驗項目(中文/英文)	梅毒螺旋體特異性抗體/TPPA	
醫令代碼	120180000001(Blood)	
檢體類別	血清	
採檢容器及檢體量		橘黃管單項量 3 ml
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1. 採檢後 8 小時內 3500 rpm 離心 10 分。 2. 血清保存期限為 15–30℃ 保存 24 小時或 2–8℃ 保存 5 天。 3. 溶血超過 3+之檢體不宜使用	
檢驗操作方法/儀器	凝集反應/人工操作	
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00	
報告完成時間	3 工作天	
檢驗效能/干擾	本試劑為測定檢體中的梅毒 Treponema Pallidum(TP)抗體價，不是直接測定梅毒 Treponema Pallidum。檢體被判為抗體陽性的場合下，對其他檢查結果、臨床症狀等請加以做整體的判斷。梅毒 TP 感染初期，抗體尚未產生，或產生的抗體量少的情況下，疑似感染但本試劑的判定結果有可能為陰性，因此請經過一段時間再檢查，並對其他的檢查(梅毒脂質抗原使用檢查、FTA-ABS 法等)結果、臨床症狀等加以做整體的判斷。於免疫血清反應，對高抗體的檢體在低稀釋情形下，請特別留意一般的 Prozone 現象。患者若曾經注射免疫血球蛋白之血液製劑，其檢體中之免疫血球蛋白製劑可能會呈陽性反應，對其相關的判定，請注意之。	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件：室溫運送 檢體保存方式： 1.採檢後 8 小時內 3500 rpm 離心 10 分鐘。 2.血清保存期限為 15–30℃ 保存 24 小時或 2–8℃ 保存 5 天。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12018C/300 點(自費價格：390 元)	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	正常參考值：<1：80 (-)。 若報告數據為 ≥1：80 (+) 時，需簡訊通報醫師， 並將結果紀錄於法定傳染病通報紀錄單。	
臨床意義與用途：被動粒子凝集法檢測人血清及血漿中之梅毒 Treponema pallidum 抗體。		

備註:可自行操作/可接受委託檢驗。