




佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：114/09/15

檢驗項目(中文/英文)	退伍軍人桿菌抗原/ Legionella Ag
醫令代碼	121910000001
檢體類別	Urine
採檢容器及檢體量	 2 mL 無菌尖底管（藍蓋/綠蓋）
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	尿液檢體以標準容器收集，如果3天內做分析，可儲存在室溫(15-30°C)。測試前在2-8°C可儲存14天或在-40°C可儲存3個月。
檢驗操作方法/儀器	STANDARD F Legionella Ag FIA採用免疫螢光技術，配合STANDARD F分析儀使用。
可送檢時間	星期一至星期日：00:00-24:00
報告完成時間	3個工作天
檢驗效能/干擾	無
檢體運送及保存方式	檢體運送條件：室溫運送 檢體保存方式： 1、3天內做分析，可儲存在室溫(15-30°C)。 2、2-8°C可儲存14天或在-40°C可儲存3個月。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	血清免疫組/4316
健保代碼/給付點數/ 自費價格	12191C/400點(自費價格：520元)
生物參考區間 (包含臨危值通報)	正常參考範圍：Negative 注意：結果為陽性時，需簡訊通報醫師，並將結果紀錄於血清急件項目記錄本。
臨床意義與用途： 退伍軍人病不會人傳人，主要是經由吸入或嚥入含有退伍軍人菌的氣霧或水滴因而致病。 即使結果呈陽性，也不排除與其他病原體的共同感染有關。 即使測試結果呈陰性，也不能肯定是其他細菌或病毒感染。 如果測試結果呈陰性，也可能是因為測試樣本中的抗原含量低於檢測限性，或是因為樣本的收集或運送不當所致。	
備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 自行操作，可接受委託	