


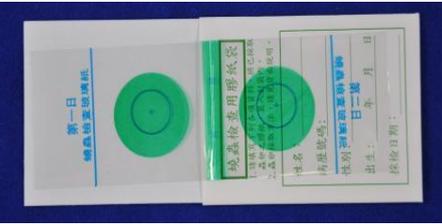

佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：115/03/19

檢驗項目(中文/英文)	中文：阿米巴及寄生蟲形態學鑑別 英文：Amoeba & Parasite OVA	
醫令代碼	070030000001~ 070030000007 Amoeba(E.histolytica / E.dispar)	
	070120000001~ 070120000007 Parasite Ova Concentration (濃縮法)	
	070110000001~ 070110000009 Parasite Ova Direct (直接鏡檢)	
	070160000001 Perianal tape for pinworm(蟯蟲膠片)	
檢體類別	Stool(糞便) 、Body fluid(體液) 、Perianal tape for pinworm (蟯蟲貼片)	
採檢容器及檢體量		採檢容器：檢便盒 檢體量：採取約一個拇指節大小
		採檢容器：紅頭試管 檢體量：2ml
		採檢容器：Perianal tape (蟯蟲貼片) 檢體量：1. 蟯蟲常在夜間爬行到肛門周圍排卵，在早上起床後立即採檢效果最好(請在早晨起床沐浴及大便前黏貼)。 2. 撕開浮貼膠紙用上膠面(即膠面圓圈處)對準肛門、以手指用力壓貼，重新粘上浮貼膠紙，即完成第一天的採樣。 3. 以同樣方法第二日再做一次，二日採樣完成，一併放入小封套。 4. 小封套上填寫病患之姓名，病歷號碼，採樣後立即送交門診檢驗組檢驗。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	立即送檢。	
檢驗操作方法/儀器	1.鏡檢法。 2. MIF糞便濃縮染色法。	
可送檢時間	24 小時。	
報告完成時間	48 小時。	
檢驗效能/干擾	找尋與鑑別是否有寄生蟲之感染	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送。 檢體保存方式:固狀形態糞便如不能立即送檢，請放置於 2-8℃ 冷藏保	

	存，當天或隔日盡快送檢。黏液狀或液態狀糞便應立即送檢，以便發現活動體。		
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機 4307		
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：07003C	給付點數：20	自費價格：26
	健保代碼：07012C	給付點數：50	自費價格：65
	健保代碼：07011C	給付點數：25	自費價格：33
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Not found。 法傳通報：Entamoeba histolytica/dispar(疑似痢疾阿米巴原蟲)。		
臨床意義與用途： <ol style="list-style-type: none"> 1. 用於找尋與鑑別是否有寄生蟲之感染。 2. 新鮮糞便適合用來觀察具活動性之原蟲類滋養體(Trophozoites)，故可提高發現率。 			
備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 自行操作。			

E6A0021968-G2

GTA00B008-1