



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：115/03/19

檢驗項目(中文/英文)	中文：糞便潛血/運鐵蛋白二合一快速檢驗 英文：FOB+TF 2 in 1	
醫令代碼	120470000001	
檢體類別	Stool(糞便)	
採檢容器及檢體量		採檢容器：檢便盒或糞便專用採樣容器。 檢體量：一個拇指指節大小。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1.採用本方法是不需飲食上的限制。 2.在女性生理期出血時不宜採樣。 3.在痔瘡出血時不宜採樣。 4.硬便時，加2.5ml buffer化糞便即可採樣。 5.嚴重下痢或水便不宜採樣。 6.1小時內盡速送檢。	
檢驗操作方法/儀器	Immunochromatographic Assay 免疫層相法。	
可送檢時間	24 小時收檢。	
報告完成時間	急件：1 小時。 常規：4 小時。	
檢驗效能/干擾	1.酒精及一些藥物如 aspirin, resepine, phenylbutazone, indomethacin, corticosteroids, 及抗過敏非類固醇的藥物，可能在有些病人身上造成腸胃刺激不間斷出血，有可能會引起免疫法的偽陽性。建議在受測前48 小時起停用，以減少干擾。 2.檢體中若含有如明礬或漂白劑類的物質亦能會造成錯誤的結果，如果懷疑檢體內含上述成分，請再準備另一新鮮無異常檢體做檢測。	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送。 檢體保存方式: 2-8℃ 保存冷藏。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機 4307。	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：FOB:09134C TF:12047B 自費價格：250元。	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	1. FOB：Negative。 2. TF：Negative。	

臨床意義與用途：

供醫師作為臨床診斷上、下消化道疾病之參考。

項目		運鐵蛋白(TF)	
		+	-
血紅蛋白 (iFOB)	+	確定消化道存在出血。	1. 下消化道出血的可能性較高。 2. 檢體中運鐵蛋白含量過少低於檢測值。 3. 受檢者體內缺乏運鐵蛋白。
	-	1. 疑似為上消化道出血。 2. 當下消化到出血量過大，血紅蛋白量超出其檢測閾值，Hb 結果會顯示假陰性。	陰性反應

備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 自行操作。