



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：115/03/19

檢驗項目(中文/英文)	中文：懷孕試驗 英文：Pregnancy test
醫令代碼	065050000001
檢體類別	Urine(尿液)。
採檢容器及檢體量	 <p>採檢容器：尿杯、尖底塑膠管或無菌檢體盒。 檢體量：5-20mL。</p>
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	若因臨床需求需用當班(8小時內)urine routine檢查之檢體可加驗，請事先來電洽詢檢驗醫學科門診鏡檢組。
檢驗操作方法/儀器	TECO one-step pregnancy test card試紙法。 人工判讀。
可送檢時間	24 小時收檢。
報告完成時間	急件：40 分鐘。 常規：1 小時。
檢驗效能/干擾	<ol style="list-style-type: none"> 1.非常稀釋的尿液檢體可能會含有不足的hCG濃度。若持續懷疑懷孕，在 48 小時後應採集早晨起床後的第一次尿液。 2.當檢體中 βhCG的濃度低過本測試的敏感度時會造成偽陰性 (false negative)。若持續懷疑懷孕，在 48 小時後應採集早晨起床後的第一次尿液。 3.測試結果若為很淡的陽性 (weakly positive)，應在 48 小時後重新採集早晨起床後的第一次尿液作為檢體，重新再測試一次來確認。 4.Trophoblastic disease及non-trophoblastic neoplasms，包括乳癌及肺癌皆會造成高 βhCG濃度。因此，不應該只用尿液檢體中的 βhCG來診斷懷孕。
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送。 檢體保存方式: 2-8 °C冷藏保存。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機 4307。
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：06505C 給付點數：100 自費價格：130 元

生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative
臨床意義與用途： 供醫師作診斷懷孕和子宮外孕，協助非懷孕之 HCG 升高之疾病的參考。	
備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 自行操作。	

E6A0021968-G2

GTA00B008-1