



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：115/04/21

<b>檢驗項目(中文/英文)</b>	中文：流行性感冒 A+B 型病毒抗原 英文：Influenza A+B Viral Antigen
<b>醫令代碼</b>	140650000003：Influenza A+B (140650000001：Influenza A，140660000001：Influenza B)
<b>檢體類別</b>	鼻咽拭子、鼻拭子或鼻咽沖洗液。
<b>採檢容器及檢體量</b>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>採檢容器</b>：專用採檢拭子(鼻咽拭棒)。</p>
<b>採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)</b>	建議檢體採集完成後，在室溫下(15-25 °C)立即送檢，收到檢體後盡快處理檢測。
<b>檢驗操作方法/儀器</b>	免疫螢光分析法 Fluorescent immunoassay (FIA) / STANDARD F2400 分析儀。
<b>可送檢時間</b>	24 小時。
<b>報告完成時間</b>	1 小時。
<b>檢驗效能/干擾</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. STANDARD F 流感 A 型+B 型 FIA 敏感性-臨床檢體測試結果 RT-PCR 結果對照：             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Influenza A sensitivity : 97.0%。</li> <li>1.2 Influenza B sensitivity : 94.3%。</li> </ol> </li> <li>2. STANDARD F 流感 A 型+B 型 FIA 特異性-臨床檢體測試結果與 RT-PCR 結果對照：             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Influenza A specificity : 100%。</li> <li>2.2 Influenza B specificity : 97.6%。</li> </ol> </li> </ol>
<b>檢體運送及保存方式</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢體運送條件: 室溫運送。</li> <li>2. 檢體保存方式: (1) 室溫(15-25 °C) 可保存 24 小時。 (2) 檢體於 2-8 °C 可保存 48 小時。 (3) 鼻(咽)拭子於病毒傳送液，在室溫(15-25 °C) 可保存 12 小時，而 2-8 °C 最長可保存 72 小時。</li> </ol>

操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/4307
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：14065C / 14066C 給付點數：150元 / 150元 自費價格：195元 / 195元
生物參考區間 (包含臨危值通報)	1. Influenza A Ag：Negative。 2. Influenza B Ag：Negative。
<b>臨床意義與用途：</b> 流行性感冒（Influenza，簡稱流感）是一種由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，與一般感冒不同，流感具有高度傳染力、爆發快速、病程長及易引起併發症等特性。發病特性為發燒，鼻炎，頭痛身體不適以及呼吸黏膜發炎。會發生虛脫，出血性支氣管炎，肺炎且可能導致重症甚至死亡。	
<b>備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)</b> 自行操作。	

E6A0021968-G2

GTA00B008-1