



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：115/03/19

檢驗項目(中文/英文)	中文：肺炎鏈球菌抗原試驗 英文：Streptococcus pneumoniae Antigen	
醫令代碼	101720000001 Streptococcus pneumoniae urine Antigen 101720000002 Streptococcus pneumoniae CSF Antigen	
檢體類別	尿液、腦脊髓液(CSF)	
採檢容器及檢體量		採檢容器：15 mL無菌尖底管（藍蓋/綠蓋） 檢體量：10 C.C
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	做試驗前，所有檢體都要平衡到達室溫才可做試驗（至少回溫30分鐘）。	
檢驗操作方法/儀器	免疫層析法(Immunochromatographic assay)	
可送檢時間	24 小時。	
報告完成時間	急件：1 小時。 常規：24 小時。	
檢驗效能/干擾	接種肺炎鏈球菌疫苗 48 小時內，可能會使檢測卡產生偽陽性結果。接種疫苗對於肺炎鏈球菌腦膜炎病患的效果尚未進行判定。因此，建議接種疫苗 5 天內，不要使用此試劑檢測。	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件： 1. 尿液：室溫運送。 2. CSF：室溫運送。 檢體保存方式： 1. 尿液：2-8°C 可儲存14天。 2. CSF：檢體冷藏在(2-8°C)或冷凍(-20°C)可保存1星期。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機 4307	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：12172C 給付點數：320 自費價格：416	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	正常參考值：Negative。	
臨床意義與用途：	肺炎鏈球菌(Streptococcus pneumoniae)為革蘭氏陽性菌，是引起社區性肺炎的主要病原菌，菌體含有莢膜(capsule)，依抗原分不同血清型，感染時可能造成肺炎、菌血症、中耳炎、腦膜炎、心內膜炎、腹膜炎及關節炎等。肺炎球菌性腦膜炎多發於兒童或老人，從發病到昏迷可能只需要幾個小時，因此立即地診斷與抗生素治療極為重要。	

備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)
自行操作。

E6A0021968-G2

GTA00B008-1