



# 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

## 服務資訊

更新日期：114/01/01

檢驗項目(中文/英文)	中文：糞便潛血定量法 英文：Immunochemical fecal occult blood test (iFOBT)	
醫令代碼	091340000003 糞便潛血免疫分析Stool occult blood(iFOB) 091340000004 糞便潛血免疫分析Stool occult blood(iFOB)-國健署45~74歲 091340000005 (社區篩檢) 國健署糞便潛血免疫定量法 091340000006 糞便潛血免疫分析Stool occult blood(iFOB)-國健署40~44歲 (一等親)	
檢體類別	Stool(糞便)	
採檢容器及檢體量		<p><b>採檢容器:</b>螺旋式採便容器(長方綠蓋糞便管)。</p> <p><b>檢體量:</b>可覆蓋採便棒螺紋溝槽的量。</p>
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、退件標準)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.將採便容器綠色的蓋子旋開，取出採便棒。</li> <li>2.在大便上不同的地方以輕劃的方式刮取檢體，刮取量約為檢體完全覆蓋溝槽即可。</li> <li>3.再將採便棒插回採便管內，向下壓，直到有喀擦的聲音，將容器上下震盪數次混合後，盡速送檢。</li> <li>4.勿將採便器中的液體倒出或任意於瓶中加水。</li> <li>5.若遇水便情形不易採樣時，請改日再取。</li> <li>6.遇痔瘡出血或女性生理期間，請暫停採便檢體。</li> </ol>	
檢驗操作方法/儀器	乳膠凝集散色比濁法(Latex agglutination immuno-turbidmetry)。	
可送檢時間	24小時收檢。	
報告完成時間	3 個工作天。	
檢驗效能/干擾	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.測定範圍：50-1000 ng/mL。</li> <li>2.陽性：<math>\geq 100</math> ng/mL。</li> </ol>	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送。 檢體保存方式: 2~10℃可保存 1 個月。	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機 4307	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：09134C 給付點數：80	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	Negative ( 0-99 ng/mL)。	

**臨床意義與用途：**

採用抗人類血紅素單株抗體檢驗方法，能降低偽陽性及提高敏感度、特異性。供醫師作診斷或是篩檢結腸直腸癌之參考。

**備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作)**

自行操作。

E6A0021968-G2