



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/10/22

檢驗項目(中文/英文)	中文：心包膜液分析 英文：Pericardial Fluid Analysis	
醫令代碼	160090000001	
檢體類別	Pericardi fluid(心包膜液)	
採檢容器及檢體量		採檢容：EDTA(紫色)試管。 檢體量：3mL。
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	1.Body fluid 採檢完後應立即送檢，以免檢體放置太久而使得 Cell lysis 影響 Cell count。 2.室溫盡快送檢，2-8°C 冷藏保存。	
檢驗操作方法/儀器	人工鏡檢。	
可送檢時間	24小時。	
報告完成時間	急件：1小時。 常規：4小時。	
檢驗效能/干擾	檢體不可與抗凝劑以外之試藥接觸。	
檢體運送及保存方式	檢體運送條件:室溫運送。 檢體保存方式: 2 -8°C冷藏保存。(24~48 小時)	
操作組別/ 檢驗諮詢分機	門診鏡檢組/分機4307	
健保代碼/給付點數/ 自費價格	健保代碼：16009C 給付點數：170 自費價格：221	
生物參考區間 (包含臨危值通報)	N/A。	
臨床意義與用途： 當心腔發炎、腫瘤、或出血時，會使得心包液的體積增加。大多數的心包積水是由於管壁間皮細胞受損引起的，心包大量積水(>350ml)通常是由於惡性疾病、尿毒症、AIDS 病患或自發性形成。		
備註：(包含是否自行操作、可否接受委託檢驗、或委外操作) 自行操作。		