



佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院

服務資訊

更新日期：113/1/31

檢驗項目(中文/英文)	PHOS
醫令代碼	090120000001、090120000002、090120000004
檢體類別	Blood、Urine
採檢容器及檢體量	1. 血清/血漿-黃頭管或綠頭管 2mL 2. 尿液-白蓋尖底管 8mL
採檢注意事項 (包含影響檢驗性能、 退件標準)	遵照例行的流程以靜脈穿刺來收集所有的血液檢體。
檢驗操作方法/儀器	DxC700AU/AU5800
可送檢時間	24 小時
報告完成時間	常規：8 小時 急件：1 小時
檢驗效能/干擾	1. 檢體離心後須確認無 fibrin 以免影響報告結果 2. 脂血, 溶血, 黃疸檢體會影響報告結果
檢體運送及保存方式	檢體運送條件: 室溫運送 檢體保存方式: 1. 血清/血漿在室溫 15-25°C 可保存 8 小時 2. 血清/血漿冷藏 2-8°C 4 天。 3. 尿液在室溫下會磷分解, 如有必要時需加 HCL 可穩定超過半年。
操作組別/ 檢驗諮詢分機	生化組(4301)
健保代碼/給付點數/ 自費價格	09012C/40/52
生物參考區間 (包含臨危值通報)	生物參考區間: 血清/血漿 2.5-5.0mg/dL, 尿液 300-1300 mg/24hours。
臨床意義與用途： 無機磷的檢測是用於診斷和治療各種疾病，包括富甲狀腺及腎臟疾病和維生素 D 的不平衡。增加：副甲狀腺機能降低、慢性腎機能不良、Vit. D 中毒、骨萎縮、甲狀腺機能亢進。降低：副甲狀腺機能亢進、缺乏 Vit. D、Fanconi 症、吸收不良症、尿細管 acidosis。	

備註:本院自行操作,可接受委託檢驗